

## Genetischer Vaterschaftstest

### Anleitung zur Probenabnahme

1) **Voraussetzungen**

Die Probanden sollen etwa eine Stunde vor der Speichelabnahme nichts gegessen und getrunken haben. Babys sollen in diesem Zeitraum auch nicht gestillt worden sein. Vor Abnahme der Proben den Mundraum mit Leitungswasser spülen. Keine Mundhygiene oder Zahnpaste verwenden.

2) **Abnahme**

Vor der Abnahme die Hülle des Stäbchens mit dem Namen der jeweiligen Person beschriften. Mit den Stäbchen wird von der zu untersuchenden Person eine Probe von der Schleimhaut zwischen Oberkiefer und Wange entnommen. Dazu reiben Sie mit dem Wattekopf des Stäbchens ca. 30 Sekunden vorsichtig im Mund an der Wangeninnenseite. Sicherheitshalber sollten von jeder Person 2 Proben genommen werden. Nach der Speichelentnahme die Stäbchen wieder in die zugehörigen Hüllen stecken (Achtung! Beschriftung der Hüllen beachten!)

3) **Versand**

Legen Sie die Abnahme-Stäbchen mit dem unterschriebenen Auftragsformular in das beiliegende Rücksendeküvert und schicken Sie es an das Labor Renner.